

JOGO TEMPORAL

O objetivo do jogo temporal é fazer o maior número de pontos (sequencias), para isso você deverá repetir as sequencias geradas por ele.

Estas sequencias são apresentadas aleatoriamente, de forma Visual (LEDs) e Auditiva, através do alto falante ou fone de ouvido, emitindo tons entre 500Hz (Hertz) á 4000Hz (Hertz).

A cada sequencia gerada aleatoriamente, será incrementada mais uma á sequencia. Você deverá repetir (seguir) as sequencias geradas e se repetir de forma correta um tom de acerto será emitido. Caso pressione algum botão errado, um tom de erro será emitido e todos os botões ficarão piscando, para iniciar novamente basta pressionar qualquer um dos 5 botões.

INICIANDO O JOGO TEMPORAL

Ao ligar o equipamento, serão apresentados as 5 frequencias, de 500Hz á 4000Hz (Hertz). Após essa apresentação, o LCD mostrará a mensagem

"Antes de Iniciar Ajuste o Valor".

Estes ajustes são feitos através do **BOTÃO AJUSTE**.

A CADA PRESSIONAMENTO DO **BOTÃO AJUSTE**, VOCÊ PASSARÁ AS TELAS DE AJUSTES DESSA FORMA :

PULSO > INTERVALO > DURAÇÃO : JOGAR

1° - PULSO : de 1 à 5 (passo de 1)

2° - INTERVALO : de 50ms á 1000ms (passos de 50milissegundos)

3° - DURAÇÃO: de 100ms á 1000ms (passos de 100milissegundos)

Para alterar os valores, você deve utilizar o **BOTÃO VERDE (DECREMENTA)** e **BOTÃO AMARELO (INCREMENTA)**.

Importante: Os ajustes de : Pulso, Intervalo e Duração, ficarão memorizados mesmo desligando o equipamento, só serão alterados se os VALORES forem reajustados.

SOBRE OS PARÂMETROS:

PULSO: de 1 á 5 : número de tons que serão emitidos a cada sequencia

INTERVALO: de 50ms á 1000ms : tempo de ausência de som entre os pulsos

DURAÇÃO : de 100ms á 1000ms: tempo de presença do som entre os pulsos

CARACTERÍSTICAS:

O Jogo Temporal tem o objetivo de estimular as habilidades :

Resolução Temporal - Ordenação Temporal - Sequencialização - Discriminação

Pode ser utilizado em pacientes normo-ouvintes com transtorno do processamento auditivo central e usuários de aparelhos auditivos e implantes cocleares para reabilitação auditiva

O Jogo Temporal emite tons (Hertz) padronizados :

500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 3000Hz e 4000Hz.

Possibilidade de ajuste dos 3 parâmetros : **Pulso, Intervalo e Duração.**

Total de possibilidades : 5 pulsos x 20 intervalo x 10 duração = 1000

As Sequencias acertadas serão mostradas no LCD. Além da pontuação máxima atingida anteriormente (Rec = Recorde), a pontuação atual que você atingiu.

Controle de Volume : atuará no alto falante interno e o Fone de Ouvido, se conectado. Ao conectar o fone de ouvido, o som do alto falante será desligado.

Chave LEDs : Possibilita ligar e desligar os LEDs, assim, os estímulos poderão se visual e auditivo ou apenas auditivo (desligando os LEDs)

Whatsapp (11) 98881-0900 -

www.mentronik.com.br

ATENÇÃO :

O Jogo Temporal possui uma fonte de alimentação externa, que pode ser conectada a rede elétrica 127V ou 220V. A chave liga/desliga somente desliga o equipamento, não a fonte alimentação. Para desligamento total, a fonte de alimentação deverá desconectada da tomada.

Plug de alimentação do Jogo Temporal



12 Volts x 2 Ampére