

Sobre o Retorno de Fala

Para que o desenvolvimento fonológico (desenvolvimento de fala) aconteça de forma adequada, é imprescindível que os processos de recepção, armazenamento e produção dos fonemas da língua ocorram de forma adequada. Quando isso não acontece, a criança pode apresentar o que popularmente é chamado de “ **trocas na fala** ”.

O **Retorno de Fala** é utilizado como um auxílio adicional nas terapias de crianças que apresentam desordens de fala. Por meio da **amplificação da própria voz**, a pessoa consegue se ouvir melhor e conseqüentemente se monitorar melhor enquanto está automatizando a produção correta dos fonemas.

O **Retorno de Fala** auxilia, principalmente, nos processos de recepção e produção.


1º - Diretamente no processo de recepção da informação auditiva, porque amplifica o som.

2º - Indiretamente no processo de produção, porque o indivíduo se ouvindo melhor consegue monitorar sua fala de forma mais adequada.

3º - Se utilizar o **Microfone de Mesa (acessório)**, outras tarefas podem ser executadas, como ; reconhecimento de fala e bombardeio auditivo.

Não é obrigatório a utilização de Microfone de Mesa junto ao Retorno de Fala; outros microfones podem ser utilizados se assim o cliente desejar, porém ter as mesmas características técnicas, assim com o tipo de plugue e configuração da conexão do cabo. Características técnicas obrigatórias para utilização de outros microfones :

Modo de ligação (padrão) do Microfone :

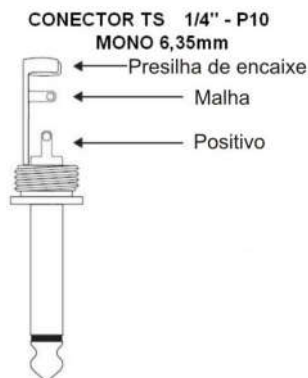

Tipo : Microfone Condensador

Impedância : 1,2 Kohm

Tensão de Operação : 1,5VCC

ALERTA !!! Embora outros microfones possam ser utilizados, não nos responsabilizamos por eventuais problemas como chiados, zumbidos, roncoss, etc

já que o comprimento do cabo do microfone, tipo de cabo, características que cada microfone possui podem alterar o funcionamento do Retorno de Fala.

Características :

O **Retorno de Fala** é um amplificador eletrônico com ajuste de ganho controlável. Possui um amplificador interno de 1 Watt que fornece potência suficiente para os fones de ouvido. O fone de ouvido possui um microfone de eletreto para captação da voz (tipo Headset).

Utilizando :

Conecte os plugues do fone e microfone nos respectivos conectores na parte frontal do **Retorno de Fala**.

Antes de ligar (chave frontal), conecte a fonte de alimentação bivolt a rede elétrica e o pino de alimentação na entrada traseira do equipamento.

Também é recomendado que o volume **do Retorno de Fala** esteja sempre no mínimo ao ligar, assim não gera microfonia (aquele “apito” forte) e dessa forma, não causará desconforto ao usuário.

Assim que ligar, coloque o fone de ouvido e fale, o microfone deve ficar à uns 3 à 5 cm de distância da boca, assim evita distorção.

O ganho pode ser ajustado de acordo com a necessidade (girando o potenciômetro para à direita aumenta o ganho, girando para esquerda, diminui o ganho.

contato@mentronik.com.br – (11) 98881-0900 (Whatsapp)